



Disponibile in 2 comodi formati:
0,25 e 0,50 grs

CODICE	TIPO OSSO	DIMENSIONE GRANULO	CONFEZIONE	FORMATO
07-5025	spongioso	0.2 - 1.0 mm	0,25 gr	Siringa
07-5050	spongioso	0.2 - 1.0 mm	0,50 gr	Siringa

La matrice di osso minerale Equimatrix® è ora disponibile anche in una pratica siringa precaricata.

La speciale progettazione offre i seguenti vantaggi:

- un'idratazione semplice e veloce delle particelle dell'innesto: la soluzione fisiologica o il sangue del paziente vengono facilmente e velocemente aspirati attraverso i granuli
- una maneggevolezza superiore: l'applicatore della siringa consente un'ottimale coesione dei granuli idratati quando vengono inseriti
- un facile accesso al sito: grazie ad un applicatore slim, Equimatrix® può essere facilmente alloggiata in ogni sito

Istruzioni per l'uso




Rimuovere la confezione di Equimatrix® dalla confezione sigillata e rimuovere il cappuccio protettivo (verde). Si noti la doppia confezione sterile: sia il blister che la siringa.



Spingere lo stantuffo per eliminare gli eccessi di spazi d'aria dal corpo della siringa



Posizionare la punta della siringa con il filtro in un contenitore sterile che contiene soluzione fisiologica o sangue del paziente.

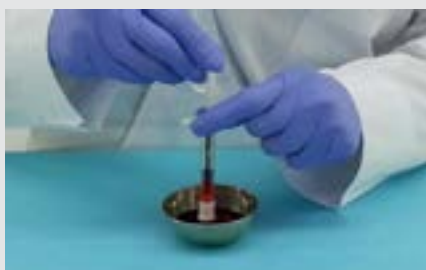

Tirare lo stantuffo per aspirare la soluzione fisiologica o il sangue tra i granuli della matrice. Si può ripetere l'operazione più volte per idratare completamente le particelle dell'innesto.



Espellere ogni eccesso di liquido spingendo piano lo stantuffo facendo attenzione a non pressare i granuli.



Rimuovere la punta del filtro per applicare i granuli idratati.