

PROTOCOLLO SEMPLICE E MIRATO PER LA PERI-IMPLANTITE

Per il trattamento della peri-implantite è necessario che l'impianto sia levigato e decontaminato prima della procedura rigenerativa.

Il nuovo antimicrobico PERISOLV® e gli spazzolini in nichel-titanio I.C.T. assolvono a questi compiti.



I.C.T.
Implant Cleaning Technique



1

Step 1: Iniziale pulizia chimica con PERISOLV®

- per evitare che i batteri vengano diffusi nel sito durante la pulizia meccanica
- per eliminare il biofilm e agevolare la rimozione del tartaro

Suggerito da Dr. Fickl,
Università di Würzburg (Germania).

2

Step 2: Levigatura dell'impianto con I.C.T. (Implant Cleaning Technique)

- per rimuovere la superficie rugosa contaminata
- per rispettare la morfologia dell'impianto senza indebolirlo con frese

3

Step 3: Seconda pulizia chimica con PERISOLV®



4

Step 4: Eventuale levigatura finale con I.C.T. (Implant Cleaning Technique)



Photo courtesy
dr Mario Rocuzzo, Torino