

PeriAcryl® 90^{HV} Alta viscosità



Rivestimento da applicare sopra i tessuti gengivali scoperti





PeriAcryl® 90^{HV} Alta viscosità



Che cos'è PeriAcryl® 90-HV Alta Viscosità?

PeriAcryl® 90-HV Alta Viscosità è una speciale miscela di butile e ottile cianoacrilato adesivi appositamente progettati per l'utilizzo orale. La formulazione **PeriAcryl® 90-HV Alta Viscosità** ha una consistenza che consente un'applicazione controllata senza sprechi.

PeriAcryl® 90-HV è prodotto da GluStitch Inc.

Caratteristiche e vantaggi di PeriAcryl® 90-HV Alta Viscosità:

Polimerizza rapidamente a contatto con acqua o saliva.

Rimane fisso fino a 14 giorni dall'applicazione.

Disponibile in kit multiuso, specificatamente progettato per gli specialisti dentali, in modo da ridurre i costi.

Viola per una migliore visibilità durante l'applicazione.

PeriAcryl® 90-HV Alta Viscosità è 9 volte più spesso della formulazione originale, in modo da consentire un maggiore controllo durante l'applicazione.

Per cosa è utilizzato PeriAcryl® 90-HV Alta Viscosità?

Come rivestimento da applicare sopra i tessuti gengivali scoperti.

Nel fissare punti di sutura chirurgici.

Nella stabilizzazione e protezione delle membrane e degli innesti.

Perché usare i prodotti PeriAcryl® 90-HV?

Per semplificare le procedure chirurgiche

Per aumentare l'efficienza procedurale

Per migliorare i risultati estetici

Per proteggersi dalle inadempienze dei pazienti

Per aumentare il comfort del paziente

Per risparmiare tempo e denaro

Codici

PeriAcryl® 90-HV 2ml

Codice

Come si usa PeriAcryl® 90-HV Alta Viscosità?

Step by step.

Fase 1

Dopo aver rimosso PeriAcryl® 90-HV dalla bottiglia con una delle pipette fornite, applicare una piccola quantità sul sito chirurgico e toccarlo brevemente con una garza di cotone bagnata.



Fase 2

Attendere circa 10 secondi che il legame adesivo inizi a formarsi, utilizzando una garza umidita oppure applicare acqua direttamente sopra lo strato di PeriAcryl® 90-HV.



Fase 3

Applicare multistrati di prodotto ripetendo i passaggi da 3 a 5 volte fino ad ottenere uno strato visibile sul sito di trattamento.



ATTENZIONE:

UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE VA CONSERVATA IN FRIGO A 5°C

Dove altro si può usare PeriAcryl® 90-HV?

Sugli FGG (Innesti gengivali liberi) e CTG (Innesti di Tessuto Connettivo) una volta effettuata l'emostasi.

Sugli innesti gengivali liberi per rinforzare le suture e proteggere il tessuto innestato.

Su lesioni melanotiche dopo l'intervento chirurgico.



Sito donatore FGG (Innesto Gengivale Libero)





Sito donatore CTG



In basso a destra, giorno dell'intervento chirurgico



Stesso paziente, 1 settimana dopo l'intervento







Gengivectomia











Protezione e stabilizzazione del tessuto connettivo













Photos courtesy of Ramon Gomez Meda, DDS

Stabilizzazione della membrana dopo l'estrazione







Photos courtesy of Kenji Hosoya Suzuri, DDS



deorematerials.com

Contatti

Per informazioni e ordini TEL. **045 6020924**

Per ordini scritti

vendite@deorematerials.com WHATSAPP (S) 3392 669 133

Per documentazione tecnica e scientifica e consulenza info@deorematerials.com